



Kurzanleitung

Produktbeschreibung:


Das SafetyVisor-Schutzvisier eignet sich als ergänzendes Element der Schutzkleidung, wodurch das Risiko von durch Tröpfchen übertragenen Infektionen verringert werden kann. Es schützt auch die Schleimhäute von Lippen, Augen und Nase vor Kontakt mit kontaminierten Händen oder Gegenständen.

Einsatzbereiche:

Für alle Personen, die ständig in Kontakt mit Menschen sind geeignet. Dient nicht als Schutz vor mechanischen Verletzungen.

Montagemethode:

1. Waschen Sie Ihre Hände gründlich, bevor Sie die Maske aufsetzen.
2. Drücken Sie die Schaumstoffeinlage in die Kopfspange.
3. Schieben Sie die Visierfolie unter den vorderen Schlitz der Kopfspange und haken Sie die vorgestanzten Löcher in die entsprechenden Halterungen.
4. Ziehen Sie das elastische Gummiband durch die Löcher am hinteren Ende der Kopfspange und knoten Sie es entsprechend der Größe des Kopfes an.

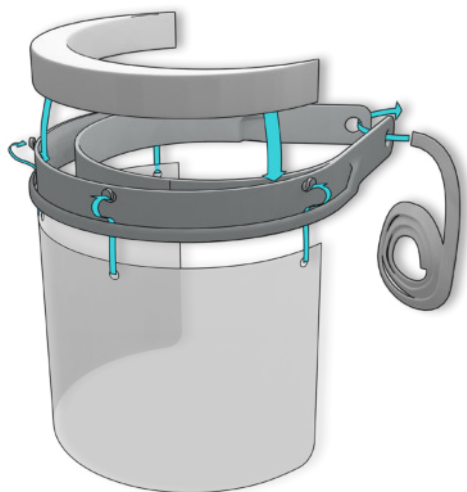

Hinweis:

Dieses Gesichtsschutzschild schützt gegen Tropfen und Spritzer von Flüssigkeiten. Damit reduziert es die Gefährdung durch eine Tröpfcheninfektion. Ein vollumfänglicher Schutz gegen Viren, Bakterien oder andere biologische Agenzien ist konstruktionsbedingt nur eingeschränkt gegeben. Kombinierbar mit Gesichtsschutzmasken (wenn anwendbar). Nach Gebrauch entsorgen! Eine Wiederverwendung liegt im Ermessen des Verwenders.

Verfallzeit des Produktes: 5 Jahre
RHELP = Herstellerkürzel/ CE = Europäische Konformität

Visierwartung:

Das Schutzvisier kann leicht von der Kopfspange abgenommen und gereinigt bzw. getauscht werden. Achten Sie nach dem Gebrauch bei der Abnahme des Visiers darauf, dass die Innenseite nicht mit schmutzigen Händen berührt wird. Waschen Sie bei Handkontakt mit der Außenseite des Visiers gründlich Ihre Hände.

Sie können die Elemente des Visiers reinigen und wiederverwenden. Es ist am besten, Sie verwenden Reinigungsprodukte auf Alkoholbasis, z.B. Fenster oder Arbeitsplattenreiniger ohne Granulat). Die Verwendung von Schwämmen, Hartgummis oder körnigen Reinigungsmitteln kann die glatte Oberfläche des Visiers trüben und dessen Transparenz beeinträchtigen. Lesen Sie zur genauen Desinfektion der Visierkomponenten alle Anweisungen der entsprechenden medizinischen Dienste und verwenden Sie die von Ihnen angegebenen Mittel.

Es wird dringend empfohlen, die SafetyVisor-Komponenten nicht mit Wassertemperaturen über 50 Grad Celsius zu reinigen, da Verformungen möglich sind. Zum Entfernen von Schmutz und starken Fetten können Sie Flüssigkeiten auf Basis von hochkonzentriertem Isopropylalkohol verwenden.

Komponenten des Sets:

1. Kopfspange
2. Visierfolie
3. Gummiband
4. Schaumstoffeinlage

Produktion

GBM Kunststofftechnik & Formenbau GmbH
Moosstraße 14
5230 Mattighofen

Konzeption und Vertrieb

regioHELP eG
Munderfing 52
5222 Munderfing

EU-Konformitätserklärung unter www.regiohelp.eu/schutz
Verwendete harmonisierte Norm: EN 166:2001

